

ORIONWebbox



Handleiding





SolutionsRadio b.v.
Motorenweg 5-k
2623CR Delft (The Netherlands)
tel: +31 15 262 59 55
fax: +31 15 257 15 95
e-mail: sales@solutionsradio.nl
URL : www.solutionsradio.nl

ORIONWebbox

v1.02 published January 18, 2010

© Copyright 2010

No part of this publication may be reproduced and/or made public by means of printing, photocopying, microfilm or any other way without a prior written permission from SolutionsRadio (www.solutionsradio.nl).



Gebruikshandleiding

1	Belangrijke instructies.....	3
2	Wat is een ORIONWebbox?	4
3	Internetaansluiting voor de ORIONWebbox.....	5
4	Wat heb ik nog meer nodig?	6
5	Hoe kan ik een hoofdtelefoon aansluiten?	7
6	Bedieningsorganen van de ORIONWebbox	8
7	Afstandsbediening van de ORIONWebbox.....	9
8	Gebruik van de orionwebbox	10
8.1	Inschakelen	10
8.2	Harder en zachter	10
8.3	Hoe kies ik uit het menu?	10
8.4	Uw bladwijzers of uw voorkeur, hoe werkt dat?	12
8.5	Afluisteren onderbreken/pauzestand	13
8.6	Vooruit-/achteruitspringen in tekst.....	13
8.7	Navigeren in (DAISY) lectuur	13



Installatiehandleiding

9	Wat zit er in de doos?.....	14
10	Heb ik naast de ORIONWebbox nog wat nodig?	16
11	De benodigde Internetaansluiting.....	17
12	Hoe sluit ik de ORIONWebbox aan?	19
13	Wat vind ik verder achterop de ORIONWebbox?	20
14	Hoe kan ik een hoofdtelefoon aansluiten?	21
15	Hoe verbind ik de ORIONWebbox draadloos?	22
16	Veel gestelde vragen.....	27
	Addendum A:	30
	Addendum B:	31
	Addendum C:.....	32



1 BELANGRIJKE INSTRUCTIES

Neemt u alstublieft de volgende richtlijnen in acht:

- Vermijd contact met water. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan!
- Maak de ORIONWebbox niet open! Neem contact op met uw leverancier als het apparaat niet goed werkt.
- Bedek nooit de bovenkant van de ORIONWebbox. De luidspreker is dan slecht hoorbaar.
- Als u de ORIONWebbox van een koude naar een warme omgeving verplaatst, wacht dan twee uur met het gebruik om de eventuele waterdamp in het apparaat te kunnen laten opdrogen.
- Sommige uitvoeringen van de ORIONWebbox zijn aan de achterzijde voorzien van een sleuf voor een SD-geheugenkaart. Dit is bedoeld voor andere toepassingen. Steek daarom geen SD-kaart in deze sleuf; dit kan tot storingen leiden.

De ORIONWebbox voldoet aan alle relevante Europese veiligheidseisen. Gedetailleerde informatie hierover vindt u (in het Engels) op onze website: <http://www.orionmediasolutions.nl>



2 WAT IS EEN ORIONWEBBOX?

De ORIONWebbox is een uiterst simpel te bedienen kastje dat via een ADSL- of kabeltelevisieaansluiting in contact met het Internet staat. Het apparaat lijkt op een radio. Met dit verschil dat programma's en diensten op verzoek zijn af te spelen en het aanbod groter en gevarieerder is. In principe kan de Webbox alle diensten die nu via Internet als audiostream, geluidsbestand of podcast worden aangeboden weergeven, echter zonder gebruik te maken van een PC.

De ORIONWebbox opent daarmee een nieuwe wereld voor ouderen, slechtzienden, mensen met leesproblemen en voor gebruikersgroepen voor wie Internet moeilijk toegankelijk is. Tegenwoordig kan de lectuur van het Loket aangepast-lezen ook via het Internet (on-line) worden beluisterd. Voor deze dienst is de ORIONWebbox de vervanger van uw Daisy-speler.

Voor slechtziende ouderen is Internet een uitkomst. De computer kan immers kranten en tijdschriften voorlezen, boeken en gedichten voordragen en nog veel meer. Maar helaas kunnen veel slechtziende ouderen niet goed met de computer overweg. Daarom is er nu de ORIONWebbox: gesproken Internet zonder tussenkomst van de computer.

Essentieel voor het gebruikersgemak van de Webbox is de Interactieve Gesproken Programmagids. Die vertelt u welke keuzes u kunt maken en meldt ook welke keuze u vervolgens maakt.

Zo kunt u hoorbaar door de programmagids van de Webbox navigeren. De tekst van de Interactieve Gesproken Programmagids is eenvoudig en eenduidig en met een simpele druk op een knop te bevestigen. Wie daar vertrouwd mee wil raken, kan desgewenst met de Webbox onder het kopje "informatie" naar een algemene gebruiksaanwijzing luisteren. Daar vindt u ook een beschrijving van het uiterlijk en de bediening.



3 INTERNETAANSLUITING VOOR DE ORIONWEBBOX

De ORIONWebbox werkt via een Internetaansluiting. Er zijn in Nederland diverse aanbieders die door middel van ADSL-techniek Internet bieden via de telefoonlijn. Voorbeelden zijn KPN, Telfort en Tele2. Dit wordt ook wel breedbandinternet genoemd. Ook kunt u in de meeste gevallen voor zo'n abonnement terecht bij uw lokale kabeltelevisiemaatschappij zoals Ziggo, CAIW of UPC. Betreft het een nieuwe aansluiting, dan ontvangt u van uw aanbieder een modem. Dit dient eerst door uzelf of door een monteur van uw aanbieder geïnstalleerd en geactiveerd te worden.

Goed om te weten:

- Een aanbieder van breedbandinternet noemen we een netwerkleverancier. Vaak wordt hiervoor de Engelse term "provider" of "Internet service provider" (ISP) gebruikt.
- Voordat u uw ORIONWebbox kunt gebruiken, moet u al over een Internetaansluiting beschikken. Deze Internetaansluiting kan ook draadloos zijn (Wi-Fi).



4 WAT HEB IK NOG MEER NODIG?

De ORIONWebbox wordt kant en klaar aangeleverd. Indien nodig configureert het apparaat zichzelf. Men hoeft het apparaat alleen maar uit te pakken en aan te sluiten. De instellingen zijn met opzet zeer beperkt gehouden zodat het apparaat voor iedereen makkelijk te bedienen is.

Verder is nodig:

- Een Internetaansluiting via ADSL of de kabelexploitant.
- Een ORION-basisabonnement.
- Lidmaatschap van het Loket aangepast-lezen voor gesproken boeken, tijdschriften en kranten.
- Een abonnement op extra diensten bijvoorbeeld voor hoorspelen (VISIO). Deze extra diensten zullen steeds worden aangekondigd onder "Mededelingen" op de Webbox.
- Het serienummer. Dit is een 5-cijferig nummer dat aan de onderzijde van de Webbox op het typeplaatje staat. Dit serienummer is belangrijk voor lidmaatschappen en abonnementen.

Goed om te weten:

- Indien u nog geen Internetverbinding heeft, dan kunt u terecht bij diverse netwerkleveranciers.
- Het programma-aanbod van de ORIONWebbox kan afhankelijk van uw wensen aangepast en/of uitgebreid worden. Voor sommige abonnementen dient u zelf contact op te nemen met de betreffende aanbieders.



5 HOE KAN IK EEN HOOFDTELEFOON AANSLUITEN?


Via de aansluiting aan de achterzijde kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.

Let op: als u een hoofdtelefoon op de audio-uitgang van uw Webbox aansluit, schakelt de luidspreker van de ORIONWebbox automatisch uit. U kunt de volumeknop van de Webbox normaal gebruiken om het volume op uw hoofdtelefoon te regelen.

Let op: Heeft uw ORIONWebbox een serienummer lager dan 20013, dan kunt u een hoofdtelefoon aansluiten via de bijgeleverde verloopkabel.




6 BEDIENINGSORGANEN VAN DE ORIONWEBBOX

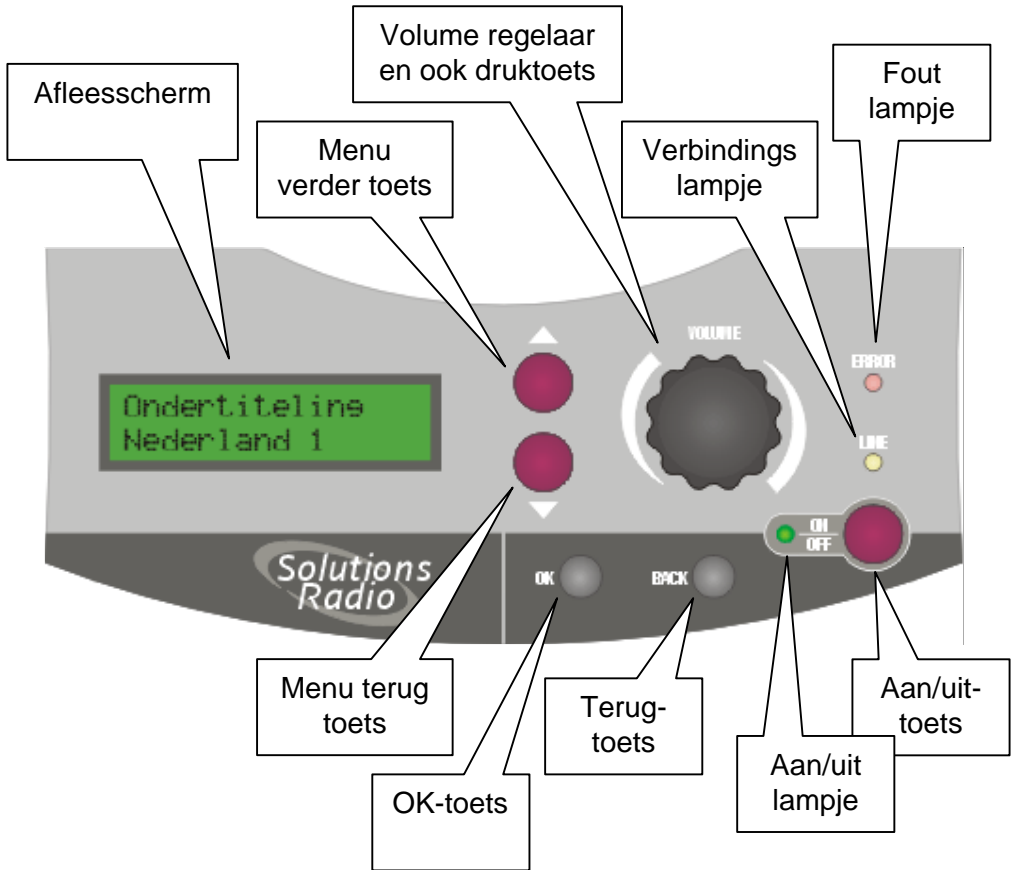

Zie Addendum A voor tekstuele uitleg.



7 AFSTANDSBEDIENING VAN DE ORIONWEBBOX

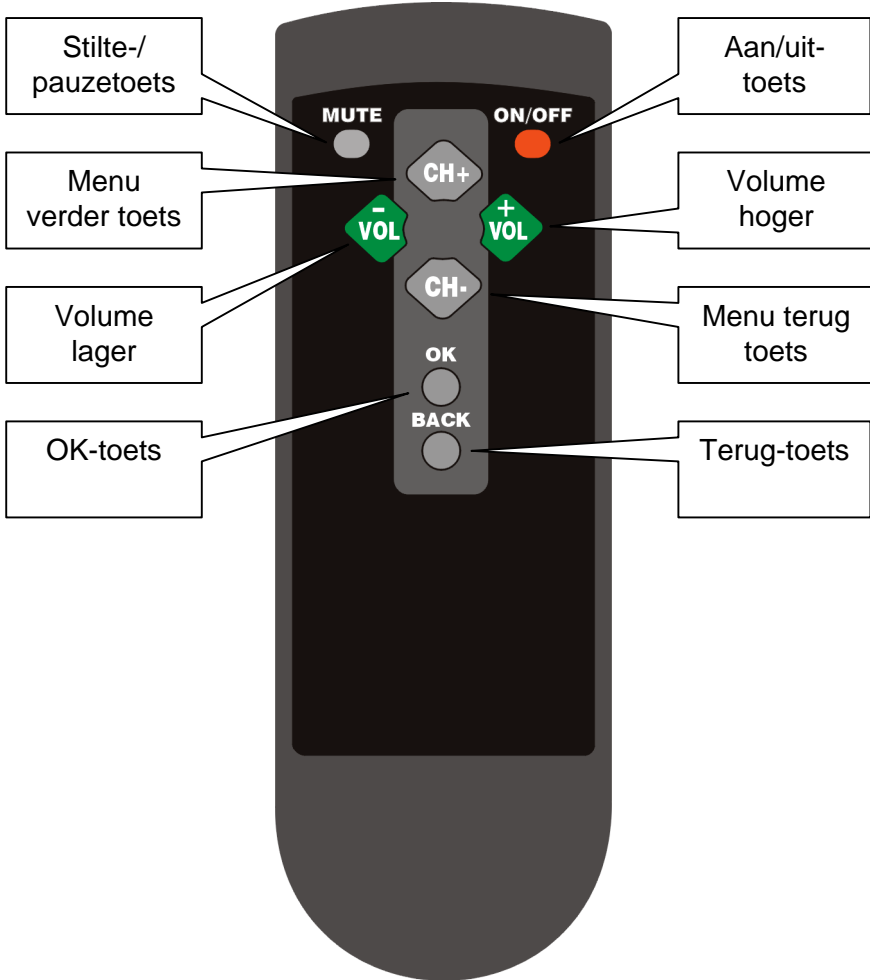

Zie Addendum B voor tekstuele uitleg.



8 GEBRUIK VAN DE ORIONWEBBOX

8.1 Inschakelen

U zet het apparaat aan met de [Aan/uit toets] op de ORIONWebbox zelf of met uw afstandsbediening. Dit is het meest rechtse knopje onderaan. Als u het apparaat aanzet, gaat het groene lampje branden en hoort u vier pieptootjes waarvan de eerste drie in een oplopende toonhoogte.

De ORIONWebbox maakt automatisch contact met Internet. Het gele lampje [Line] gaat dan knipperen. De Webbox haalt de meest actuele gegevens op en verwerkt die in het menu. Als dit succesvol is verlopen, gaat het gele lampje constant branden.

U zet het apparaat uit door opnieuw op de [Aan/uit toets] te drukken. De groene en gele lampjes gaan uit en u hoort drie piepjes in aflopende toonhoogte.

- Wanneer een programma is afgelopen en u drukt niet binnen vijf minuten op een knop, dan schakelt het apparaat zichzelf uit.

8.2 Harder en zachter

Nadat u het apparaat heeft aangezet, maakt de ORIONWebbox contact met het Internet en zal de Webbox u het keuzemenu voorlezen. Het kan zijn dat het volume te zacht of te hard staat. Gebruik de volumeknop op de Webbox, dit is de grote ronde regelaar rechts op het front (of VOL+/VOL- op uw afstandsbediening) om het geluid harder of zachter te zetten.

8.3 Hoe kies ik uit het menu?

De ORIONWebbox leest na het inschakelen alle mogelijke keuzes uit het hoofdmenu voor. De lijst is afhankelijk van het abonnement dat u gekozen heeft. Het hoofdmenu bestaat minimaal uit:



1. **Mijn bladwijzers** (Hier vindt u uw bladwijzers en laatst beluisterde voorkeuzenders en programma's)
2. **Actualiteiten** (waaronder: Horizon, het dagelijks magazine voor blinden en slechtzienden, ANP-nieuws, weerbericht, dagelijkse krant)
3. **Gesproken televisie ondertiteling**
4. **Radio en themakanalen** (onderverdeeld in RTV-gids, radiozenders, hoorspelen, enz.)
5. **Lectuur** (met als keuzemogelijkheden: Loket aangepast-lezen, CBB, enz.)
6. **Verenigingsnieuws** (Hier vindt u informatie van de NVBS, de NLBB, het CBB, maar ook van diverse patiëntenorganisaties zoals de MD-vereniging, enz.)
7. **Informatie** (Hier vindt u mededelingen en de verkorte handleiding van de ORIONWebbox)

Als de ORIONWebbox het hoofdmenu voorleest en u wilt daaruit een keuze maken - zoals gesproken boeken - dan drukt u op de [OK-toets], de meest linker toets op het front van de Webbox of op de [OK-toets] op de afstandsbediening. Wanneer u tijdens het voorlezen van het menu niet op de [OK-toets] drukt, dan wordt de lijst met keuzemogelijkheden opnieuw voorgelezen. Dit gaat net zo lang door totdat u een keuze maakt.

- Kiest u per ongeluk iets uit het menu dat u niet wilt? Druk dan op de [Terug-toets]. Dit is de middelste toets op het front en de onderste toets op de afstandsbediening. De ORIONWebbox keert dan automatisch terug naar het menu en leest u de mogelijkheden opnieuw voor.

Als u een keuze hebt gemaakt -zoals gesproken boeken- dan zal de ORIONWebbox u na een korte stilte voorlezen welke boeken beschikbaar zijn. Als de ORIONWebbox de titel van een boek voorleest



dat u graag wilt beluisteren, drukt u op de [OK-toets] op de Webbox of op uw afstandsbediening.

- Als u tijdens het voorlezen van het menu niet op de [OK-toets] drukt, leest het apparaat het menu opnieuw aan u voor en doet dat net zo lang tot u een keuze maakt.

Als u op de [OK-toets] drukt begint de ORIONWebbox het boek van uw keuze aan u voor te lezen.

8.4 Uw bladwijzers of uw voorkeur, hoe werkt dat?

U kunt het luisteren naar boeken, kranten of tijdschriften op elk gewenst moment onderbreken. Door langer (circa 4 seconden) op de volumeregelaar te drukken, laat u de Webbox voor u onthouden waar u gebleven bent in een boek, krant of tijdschrift. Het geluid is dan even stil en op dat moment plaatst u een bladwijzer. Het is ook mogelijk om met de afstandsbediening een bladwijzer te plaatsen. Dit doet u door de stiltetoets [Mute] circa 4 seconden ingedrukt te houden totdat het geluid terugkomt. Ook als u de Webbox helemaal uitschakelt “onthoudt” het apparaat waar u het laatst naar geluisterd heeft.

- De volgende keer dat u verder wilt luisteren, kunt u via ["mijn voorkeur"] teruggaan naar waar u de laatste keer gebleven was. U vindt de functie in het hoofdmenu. In de menukeuze kunt u naast de laatst geplaatste bladwijzer via [Menu verder] en [Menu terug] nog zo'n tiental andere bladwijzers die voordien zijn geplaatst, terugvinden. Naast bladwijzers in boeken en tijdschriften kunt u op dezelfde manier ook een voorkeurprogramma aangeven zoals bijvoorbeeld een radiostation waar u graag naar luistert. De bladwijzer wordt daarom ook wel “mijn voorkeur” genoemd.



8.5 Afluisteren onderbreken/pauzestand

U kunt het afluisteren onderbreken door de volumeregelaar in te drukken. Het indrukken van de pauze- of stiltetoets [Mute] op de afstandsbediening heeft hetzelfde effect. De ORIONWebbox staat dan in de pauzestand. Het afluisteren wordt hervat door de volumeknop of de pauze- of stiltetoets op de afstandsbediening opnieuw in te drukken.

8.6 Vooruit-/achteruitspringen in tekst


Bij het voorlezen van kranten, tijdschriften, boeken en dergelijke kunt u in de pauzestand met de volumeregelaar door de tekst binnen een hoofdstuk springen. Door de volumeregelaar naar links te draaien, of door op de afstandsbediening de toets [Volume lager] te gebruiken, gaat u terug in de tekst. Door naar rechts te draaien, of door de toets [Volume hoger] te gebruiken, gaat u vooruit. Per karteltje van de volumeknop, of per keer drukken op [VOL+/VOL-] van de afstandsbediening, verschuift u tien seconden in de tijd. Drukt u daarna nogmaals op de volumeregelaar of de [Mute toets] van de afstandsbediening dan begint het voorlezen vanaf het op die wijze ingesteld punt. Om dit te bevestigen, kunt u ook de [OK-toets] gebruiken. Let op: vooruit- en achteruitspringen werkt alleen binnen een hoofdstuk.

8.7 Navigeren in (DAISY) lectuur

Bij het voorlezen van kranten, tijdschriften, boeken en dergelijke die beschikken over een Daisy-structuur kunt u de ORIONWebbox op een ander punt laten beginnen dan bij het eerste hoofdstuk of het eerste artikel. Met de knop [Menu verder] kunt u de ORIONWebbox steeds een hoofdstuk of artikel verderop laten beginnen. Met de knop [Menu terug] kunt u steeds een hoofdstuk of artikel terug gaan. Op de afstandsbediening gebruikt u eveneens [Menu verder] en [Menu terug].



Installatie handleiding

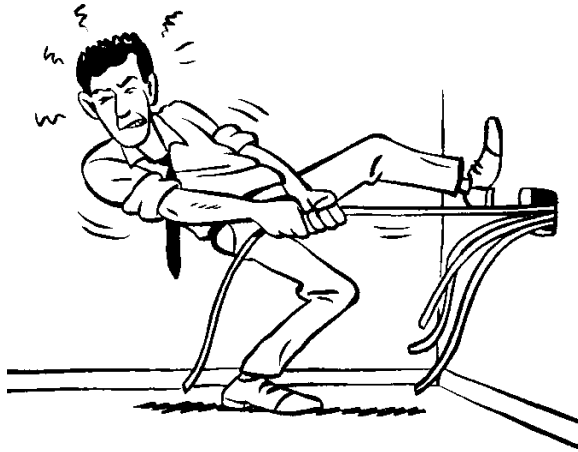



9 WAT ZIT ER IN DE DOOS?

ORIONWebbox



Afstandsbediening



1. ORIONWebbox
2. Afstandsbediening
3. Batterijen
4. Netsnoer
5. Ethernetkabel
6. Audiokabel

Netsnoer



Batterijen



Ethernetkabel



Audiokabel





10 HEB IK NAAST DE ORIONWEBBOX NOG WAT NODIG?

De ORIONWebbox wordt kant en klaar aangeleverd. Indien nodig configureert het apparaat zichzelf. Men hoeft het apparaat alleen maar uit te pakken en aan te sluiten. De instellingen zijn met opzet zeer beperkt gehouden zodat het apparaat voor iedereen dus ook voor ouderen en “digibeten” makkelijk te bedienen is. Verder is nodig:

- Een Internetaansluiting via ADSL of de kabelexploitant.
- Een ORION-basisabonnement
- Lidmaatschap van het Loket aangepast-lezen voor gesproken boeken, tijdschriften en kranten.
- Een abonnement op extra diensten bijvoorbeeld voor hoorspelen (VISIO). Deze extra diensten zullen steeds worden aangekondigd onder “Mededelingen” op de Webbox.

Goed om te weten:

- Indien u nog geen Internetverbinding heeft, dan kunt u terecht bij diverse netwerkleveranciers.
- Het programma-aanbod van de ORIONWebbox kan afhankelijk van uw wensen aangepast en/of uitgebreid worden. Voor sommige abonnementen dient u zelf contact op te nemen met de betreffende aanbieders.



11 DE BENODIGDE INTERNETAANSLUITING

De ORIONWebbox werkt via een Internetaansluiting. Er zijn in Nederland diverse aanbieders die door middel van ADSL-techniek Internet bieden via de telefoonlijn. Voorbeelden zijn KPN, Telfort en Tele2. Dit wordt ook wel breedbandinternet genoemd. Ook kunt u in de meeste gevallen voor zo'n abonnement terecht bij uw lokale kabeltelevisiemaatschappij zoals Ziggo, CAIW of UPC.

Een aanbieder van breedbandinternet noemen we een netwerkleverancier. Vaak wordt hiervoor de Engelse term "provider" of "Internet service provider" (ISP) gebruikt.

Voordat u uw ORIONWebbox kunt gebruiken, moet u al over een Internetaansluiting beschikken. Betreft het een nieuwe aansluiting, dan ontvangt u van uw aanbieder een modem. Dit dient eerst door uzelf of door een monteur van uw aanbieder geïnstalleerd te worden. Dit houdt in dat het modem met een kabel aangesloten wordt op het aansluitpunt van kabeltelevisie of telefoonlijn in uw woning. In een modern huis zal dit aansluitpunt zich meestal in de meterkast bevinden.

Na de installatie van het modem moet het eerst door uw netwerkleverancier geactiveerd worden. Vervolgens wordt de ORIONWebbox ofwel draadloos, of met een zogeheten Ethernetkabel aangesloten op het modem. Is deze geïnstalleerd in de meterkast, dan dient die kabel hiervoor aangelegd te worden naar de kamer waar uw ORIONWebbox staat opgesteld.

In sommige gevallen is het modem geschikt om slechts één computer aan te kunnen sluiten. Het beschikt in dat geval niet over een zogeheten routeerfunctionaliteit. Als dit het geval is, dan is naast het modem nog een zogeheten router nodig, die als schakel dient tussen het modem en de ORIONWebbox. Ook die router moet eerst geïnstalleerd en



geconfigureerd zijn alvorens u een verbinding kunt maken. Informatie hieromtrent kunt u inwinnen bij uw netwerkleverancier.

Indien u gebruik maakt van een ORIONWebbox met draadloze Internetverbinding (Wi-Fi), dan is een modem met ondersteuning voor draadloos Internet nodig. Sommige Internetabbonementen worden geleverd inclusief draadloos modem. In dat geval is altijd een router ingebouwd.

Bij het instellen van het modem is het zaak om te letten op het gebruikte uitzendkanaal. Het is aan te bevelen om te kiezen voor automatische kanaalkeuze. Ook zult u voor de beveiliging van de verbinding een zogenaamde WPA- of WEP-code moeten instellen. Voor meer informatie daaromtrent zie verderop in deze handleiding.

Op dit moment zijn de volgende configuraties bij ons bekend:

<u>Netwerkleverancier</u>	<u>Externe router nodig?</u>
Alice Internet	Ja
Caiway Internet Basis	Ja
Het Net Instap Surfen	Nee
KPN Internet Basis	Nee
SlimBellen	Nee
Tele2 ADSL Lite	Ja
Tele2 ADSL Super	Nee
Tele2 Internet + Bellen	Nee
Telfort Internet	Ja
UPC Internet starter	Ja
Ziggo Internet	Ja

Internetabbonementen wijzigen voortdurend. Informeer daarom altijd bij de netwerk-leverancier van uw voorkeur.



12 HOE SLUIT IK DE ORIONWEBBOX AAN?

Sluit de Ethernetkabel aan tussen de ORIONWebbox en het modem van uw Internetaanbieder.

- Stop het ene uiteinde van het elektriciteitssnoer in de ingang aan de achterkant van de ORIONWebbox en het andere uiteinde in het stopcontact.
- Indien u de afstandsbediening wilt gebruiken: open het klepje aan de achterzijde en plaats de batterijen in de afstandsbediening. Let op dat de plus en min op de juiste plaats zitten.
- Voor het aansluiten op een draadloos netwerk zie verderop.



13 WAT VIND IK VERDER ACHTEROP DE ORIONWEBBOX?

- Sleuf voor SD-kaart (wordt niet gebruikt)
- Telefoonaansluitingen (worden niet gebruikt)

Voor tekstuele uitleg van de achterkant zie Addendum C.

Met de bijgeleverde geluidskabel kunt u de ORIONWebbox op uw stereo-installatie aansluiten. U steekt de pluggen van de geluidskabel in de gaatjes van de audio-uitgang van de Webbox. De andere kant van de geluidskabel sluit u aan op een ingang voor cassettedeck, cd of video van uw versterker.

Let op: als u de ORIONWebbox op een geluidssysteem aansluit en u wilt de interne luidspreker van de Webbox uitschakelen, dan gaat u als volgt te werk: Ga naar Audio menu door de [OK-toets] ingedrukt te houden. Vervolgens kunt u met [Menu verder] kiezen voor speaker of lijnuitgang (line-out).



14 HOE KAN IK EEN HOOFDTELEFOON AANSLUITEN?

Via de aansluiting aan de achterzijde kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.

Let op: als u een hoofdtelefoon op de audio-uitgang van uw Webbox aansluit, schakelt de luidspreker van de ORIONWebbox automatisch uit. U kunt de volumeknop van de Webbox normaal gebruiken om het volume op uw hoofdtelefoon te regelen.

Let op: Heeft uw ORIONWebbox een serienummer lager dan 20013, dan kunt u een hoofdtelefoon aansluiten via de bijgeleverde verloopkabel.



15 HOE VERBIND IK DE ORIONWEBBOX DRAADLOOS?

Doorloop de volgende stappen om de ORIONWebbox te verbinden via een draadloos netwerk:

- Voordat u de draadloze verbinding gaat instellen, zorg altijd dat de Webbox eerst via de vaste aansluiting wordt aangesloten, aangezet en heeft gewerkt, zodat zeker is dat uw Internet correct functioneert.
- Verwijder de vaste aansluiting en schakel de Webbox in met de Aan/uit knop en houd daarbij de [OK-toets] ingedrukt.
- Laat de [OK-toets] los als in het scherm [Audio More...] verschijnt.
- Gebruik [Menu verder] om naar [Network More...] te gaan.
- Druk op de [OK-toets]. [Ethernet More...] verschijnt nu in het scherm.
- Gebruik [Menu verder] om naar [Wireless More...] te gaan.
- Druk op de [OK-toets]; onderin het scherm staat nu [Scanning...]. De Webbox zoekt nu naar draadloze netwerken in de omgeving.
- Wacht tot op de onderste regel van het scherm de tekst [Select SSID] verschijnt. Gebruik vervolgens [Menu verder] en [Menu terug] of de ronde draaiknop tot in de onderste regel de naam (SSID) van uw draadloos toegangspunt verschijnt. Dit staat mogelijk op uw modem of in de handleiding van uw netwerkaanbieder vermeld.
- Druk op de [OK-toets] om te bevestigen dat u dit netwerk wilt gebruiken.



- Als het toegangspunt onbeveiligd is, dan verschijnt de tekst [Activating...]. De Webbox is na automatisch herstarten klaar voor gebruik.
- Als het toegangspunt beveiligd is, dan verschijnt de tekst [Enter WEP/WPA key...] in het scherm. Gebruik [Menu verder] en [Menu terug] of de ronde draaiknop om het eerste karakter van dit wachtwoord op te zoeken. Let bij WPA/WPA2 op grote en kleine letters (bij WEP is dat onbelangrijk). Het wachtwoord staat mogelijk op uw modem of router of staat in de handleiding van uw netwerkaanbieder vermeld. Verdere toelichting op beveiligde netwerken vindt u op pagina 19.
- Druk op de [OK-toets] om te bevestigen en naar de volgende karakters te gaan, die op dezelfde manier kunnen worden ingevoerd.
- Zoek na het ingeven van het laatste karakter het teken [pijlje terug/of ENTER] geheel achter in de lijst op en druk op de [OK-toets].
- In het scherm verschijnt achtereenvolgens [Saving...] en [Activating...]. De Webbox is na automatisch herstarten ingesteld op uw draadloos netwerk.
- De ORIONWebbox is nu klaar voor gebruik.

Goed om te weten:

- Lukt het niet om te verbinden met een draadloos netwerk, probeer dan eerst of het lukt om de Webbox te laten werken door de bijgeleverde Ethernetkabel op uw modem of router aan te sluiten.
- Wanneer een Ethernetkabel op de Webbox wordt aangesloten, dan heeft die aansluiting prioriteit boven een draadloos netwerk. Wordt



de kabel losgenomen, dan schakelt de Webbox automatisch terug naar de draadloze communicatie.

- Als de Webbox uw netwerk niet kan vinden, controleert u dan eerst of het modem een netwerknaam (SSID) uitzendt en of het dicht genoeg in de buurt staat opgesteld. Normaal gesproken is het bereik afhankelijk van de situatie zo'n 15 tot 25 meter. De Webbox ondersteunt WLAN netwerken met WEP- en WPA sleutel conform de IEEE 802.11b en 802.11g standaarden.
- Als geen netwerk wordt gevonden zal de tekst [Unavailable...] verschijnen. Lukt het nog steeds niet, raadpleeg dan uw netwerkleverancier.

Uw netwerk ondersteunt geen DHCP?

De Webbox gaat er standaard vanuit dat uw modem het zogenaamde DHCP ondersteunt waardoor het automatisch een IP-adres krijgt toegewezen. Is dat niet het geval, dan moet het adres handmatig worden ingegeven. Dit kan als volgt:

- Schakel de Webbox in met de Aan/uit-knop en houd daarbij de [OK-toets] ingedrukt.
- Laat de [OK-toets] los als in het scherm [Audio More...] verschijnt.
- Gebruik [Menu verder] om naar [Network More...] te gaan.
- Druk op de [OK-toets]. [Ethernet More...] verschijnt nu in het scherm.
- Druk op de [OK-toets] en gebruik [Menu verder] om naar DHCP te gaan. Druk opnieuw op de [OK-toets] en gebruik [Menu verder] of de volumeregelaar om DHCP op de stand [Off] te zetten. Bevestig dit met de [OK-toets].



- Gebruik [Menu verder] om naar [IP address] te gaan. Druk wederom op de [OK-toets].
- Gebruik [Menu verder] en [Menu terug] of de ronde draaiknop om het IP-adres in te voeren. Druk de [OK-toets] om elk karakter telkens te bevestigen.
- Gebruik de [Terug-toets] en blader via [Menu verder] en [Menu terug] door om respectievelijk [Netmask], [Default gateway] en [DNS server] in te stellen.
- Na uit- en opnieuw inschakelen is de ORIONWebbox klaar voor gebruik.

Goed om te weten:

- De ORIONWebbox ondersteunt de volgende beveiligingen voor (wifi) draadloze netwerken:
 - WEP64
 - WEP128
 - WPA-PSK+TKIP
 - WPA2-PSK+AES

De Webbox werkt niet met WPA-PSK over AES aangezien dit geen solide standaard is.

- WPA2 is de best ondersteunde methode in de Webbox en is ook nog eens het veiligst. Kies dus bij voorkeur voor WPA2 indien uw modem of router die mogelijkheid biedt.
- Indien uw modem of router WPA2 TKIP+AES als mogelijkheid aangeeft, dan werkt het apparaat in de zogenaamde “migratiestand”.



Daarbij wordt zowel WPA1/TKIP als WPA2/AES ondersteund. De Webbox kiest vervolgens automatisch één van beide.

- Indien uw modem of router van WPA1 naar WPA2 overschakelt, dan is het noodzakelijk dat de procedure voor de draadloze verbinding opnieuw wordt doorlopen.
- PSK staat voor “Pre Shared Key” (ook wel eens “personal” genoemd). Dit is de standaardmethode voor het ingeven van de beveiligingssleutel. Dit in tegenstelling tot de “Radius”- of “Enterprise”-methode die theoretisch alleen door bedrijven gebruikt kan worden.
- WEP kan problemen geven omdat er vier beveiligingssleutels gedefinieerd kunnen worden. De Webbox werkt alleen met de eerste sleutel; normaal gesproken ook de enige die ingegeven wordt.
- WEP-beveiligingssleutels moeten als hexadecimaal getal worden ingegeven. Dit is een code die naast cijfers ook uit de letters A tot en met F kan bestaan (hoofdletter ongevoelig, WEP64 heeft 10 en WEP128 heeft 26 hex-getallen).
- De Webbox meldt zelf niet of de methode WPA1 of WPA2 actief is. In beide gevallen zal op het moment dat de beveiligingssleutel kan worden ingevoerd de melding [Enter WPA key...] zichtbaar zijn in het scherm.
- Sommige modems of routers hebben speciale merkspecifieke instellingen. We adviseren u om hier niets aan te wijzigen.



16 VEEL GESTELDE VRAGEN

Mocht u vragen of problemen hebben met de ORIONWebbox, kijk dan alstublieft eerst bij de volgende veelgestelde vragen:

- **Als ik op de AAN/UIT knop druk gaat er geen groen lichtje branden. Wat nu?**

Controleer of de elektriciteitskabel goed is aangesloten. Als dat zo is: controleer of andere apparaten aangesloten op hetzelfde stopcontact het wel doen. Zo niet: vervang dan de stop in uw meterkast. Zo ja: neem contact op met uw leverancier.

- **Ik druk op de AAN/UIT knop maar de Webbox zoekt geen contact met Internet. Wat nu?**

Controleer of de Ethernetkabel en/of de router op de juiste manier is aangesloten. Als dat zo is: bel uw netwerkaanbieder en informeer of er problemen zijn met het netwerk. Als er geen problemen zijn: neem contact op met de leverancier van de Webbox.

- **Als ik op de AAN/UIT knop druk, gebeurt er niets.**

Indien bovengenoemde acties niet helpen, kunt u ook de aansluitkabel even uit het stopcontact halen en na een paar seconden weer terug steken.

- **Het groene lichtje brandt maar ik hoor niks. Wat nu?**

Het kan zijn dat de Webbox een nieuwe versie van het besturingsprogramma (firmware genaamd) aan het installeren is. Dit kan een paar minuten duren. Knippert het gele lampje, dan is de Webbox (nog steeds) bezig. Als het gele lichtje niet knippert, draai de volumeknop op het apparaat of op de afstandsbediening hoger. Als dat niet helpt: druk op de volumeregelaar om de stiltefunctie (mute) ongedaan te maken. Als dat niet helpt: controleer of er nog een



hoofdtelefoon of geluidskabel op de Webbox aangesloten is. Zo ja: verwijder die.

- **Het geluid van de Webbox klinkt vervormd. Hoe kan dat?**

Ligt er een mobiele telefoon vlakbij de Webbox? Haal die weg.

Staat een basisstation van uw telefoon (of draadloze hoofdtelefoon) vlakbij de Webbox? Haal die weg.

Staat er een laptop met draadloos Internet vlakbij de Webbox? Haal die weg.

- **De Webbox werkt niet of “doet” anders dan normaal.**

Het zou kunnen zijn dat de Webbox “van slag” geraakt is. Dit kan mogelijk worden opgelost door de Webbox opnieuw op te starten met de fabrieksinstellingen. Schakel hiervoor het apparaat uit en daarna weer in terwijl u de [Terug-toets] ingedrukt houdt. In het scherm verschijnt nu de tekst [Factory default?]. Druk nu binnen een paar seconden de [OK-toets] in om de procedure te bevestigen. Schakel daarna de Webbox opnieuw een keer uit en weer in.

- **De draadloze verbinding werkt niet meer.**

Ontkoppel de Webbox tijdelijk van de stroomaansluiting zodat de draadloze verbinding wordt onderbroken. Schakel daarna de Webbox opnieuw in. Daarna duurt het circa 1 minuut voordat de Webbox weer werkt.

Probeer of het lukt om de Webbox te laten werken door het apparaat rechtstreeks door middel van de bijgeleverde Ethernetkabel op uw modem of router aan te sluiten. Werkt dit wel, dan kunt u proberen om opnieuw draadloos te verbinden.

Controleer bij de instellingen van uw modem of router of de kanaalkeuze staat ingesteld op automatisch in plaats van op een specifiek kanaalnummer. Is het laatste het geval, wijzig dan de instelling naar automatisch. Raadpleeg indien nodig uw netwerkleverancier.



- **De ondertiteling wordt niet uitgesproken terwijl die wel op de televisie te zien is.**

Er zijn programma's waar de tekst in de film is ingebrand. In die situatie wordt het ondertitelsignaal niet aan ons aangeboden en kan de Webbox het niet weergeven.

- **Ondertiteling is niet synchroon met het beeld**

Indien de gesproken ondertiteling en de ondertiteling op de TV niet synchroon zijn, kunt u dat melden bij uw leverancier. Zij zijn in staat om dit voor uw Webbox in te stellen.

- **Een radiozender werkt niet meer**

Probeer later nog eens. Het kan zijn dat de radiozender tijdelijk onvoldoende capaciteit beschikbaar heeft.



ADDENDUM A:

Beschrijving van de buitenkant van de ORIONWebbox

Aan de voorkant van het apparaat bevinden zich vijf drukknoppen en één draaiknop. De laatste gebruikt u om het gewenste volume in te stellen. Als u deze knop kort indrukt, pauzeert u in de gelezen tekst of plaatst u bij langer indrukken een bladwijzer. Deze functie is uitermate handig bij het beluisteren van een boek of krant. U heft de pauze op door deze draaiknop nog eens kort in te drukken.

Rechts onderaan bevindt zich de aan-/uit toets. Links daarvan treft u twee druktoetsen aan: uiterst links de OK-toets en in het midden de Terug-toets. Verder bevindt zich aan de voorkant van het apparaat helemaal links het display. Daarop wordt getoond waar u op dat moment naar luistert. De diverse rubrieken van de Webbox verschijnen eveneens op het display als u de interactieve gesproken programmagids beluistert. Rechts van het display en boven de OK-toets bevinden zich boven elkaar twee iets grotere roodgekleurde toetsen. Dat zijn de Menu verder en Menu terug toetsen. Hiermee kunt u door het keuzemenu navigeren. In het midden bovenop de Webbox bevindt zich de ingebouwde luidspreker. Deze luidspreker wordt uitgeschakeld als de hoofdtelefoon wordt aangesloten en kan worden uitgeschakeld als de Webbox is aangesloten op een versterkerinstallatie.

In het midden aan de voorkant bevindt zich een infrarood oog, zodat u de ORIONWebbox ook met de meegeleverde afstandsbediening kunt bedienen.



ADDENDUM B:

Beschrijving van de afstandsbediening.

Op de afstandsbediening bevinden zich acht druktoetsen.

Links boven is de stilte- of pauzetoets.

Rechts boven is de aan/uit toets.

In het midden van de afstandsbediening bevinden zich onder elkaar vier toetsen, namelijk Menu verder, Menu terug, OK-toets en de Terug-toets.

Tussen de Menu verder en Menu terug toetsen bevinden zich links en rechts de Volume lager en Volume hoger toetsen.

Bij bediening is het belangrijk dat het infrarood oog van de afstandsbediening op de ORIONWebbox wordt gericht.



ADDENDUM C:

Op de achterkant van het apparaat treft u van links naar rechts de volgende aansluitmogelijkheden aan: allereerst twee ingangen voor een analoge telefoonlijn. Deze worden voor de ORIONWebbox niet gebruikt. Daarnaast bevinden zich twee uitgangen om de ORIONWebbox te verbinden met de stereo-installatie. Natuurlijk kunt u ook een hoofdtelefoon aansluiten. Daarnaast bevindt zich de Ethernet-plug om te verbinden met een ADSL- of breedbandmodem of een router. Dat is de bewuste Internetaansluiting. Helemaal rechts bevindt zich de netaansluiting van de Webbox. De ORIONWebbox is leverbaar met een WiFi ofwel een draadloze Internetaansluiting. Met een ORIONWebbox die daarmee is uitgerust, kunt u overal in en om het huis, waar maar een stopcontact is, van de ORIONWebbox gebruik maken. Sommige Webboxen hebben ook een SD-sleuf aan de achterzijde. Deze is voor andere toepassingen bedoeld en kan dus niet gebruikt worden.